

Dati tecnici	A-17	A-22	A-28
Tensione di alimentazione		220/240V 50Hz 220/230V 60Hz	
Potenza nominale		2300 W	
Dimensioni esterne LxAxP		480 x 500 x 600 mm	
Dimensioni camera DxP	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Peso totale	50 kg	51 kg	52 kg
Capacità serbatoio		4,5 litri	
Autonomia (con acqua al livello max)	da 7 a 11 cicli	da 6 a 10 cicli	da 5 a 9 cicli

CICLO	Tipo ciclo	Tempo di Sterilizzazione (min.)	A-17	A-22	A-28	Asciugatura*
			Tempi ciclo compresi di tempo di sterilizzazione, al netto del tempo d'asciugatura (min.)			
134 °C UNIVERSALE	B	4	29	31	39	13-17
121 °C UNIVERSALE	B	20	45	48	52	13-17
134 °C VELOCE	S	4	21	24	27	1
134 °C SOLIDI IMBUSTATI	S	4	20	24	28	13-17
134 °C PRIONE	B	18	43	45	53	13-17
xxx °C CUSTOM	S	Ciclo personalizzabile dall'utente con temperature 134 °C / 121 °C, tempi di processo a partire da 4' (134 °C) o 20' (121 °C) e asciugatura impostabile				
VACUUM TEST		TEST	18	18	19	
HELIX/B&D TEST		TEST	20	24	28	
VACUUM + HELIX/B&D TEST (eseguiti in sequenza)		TEST	42	46	51	

* L'asciugatura varia in base al modello e al volume della macchina
 Nota: i tempi non considerano il tempo di preriscaldamento max (10min).
 Nota: i tempi possono variare in base al carico e all'alimentazione elettrica.
 Nota: i tempi dei modelli a 120V possono subire incrementi no ad un max. del 20%



Making Your Life Better.

BU Medical Equipment**Sede legale ed amministrativa
Headquarters**

Cefla s.c.
 Via Selice Provinciale, 23/a
 40026 Imola - Bo (Italy)
 tel. +39 0542 653111
 fax +39 0542 653344

**Stabilimento
Plant**

Via Bicocca, 14/c
 40026 Imola - Bo (Italy)
 tel. +39 0542 653441
 fax +39 0542 653601



QUALITÀ SENZA COMPROMESSI

AUTOCLAVI ANTHOS A

A-17
 A-22
 A-28

A.

re liabile



ENJOY THE DIFFERENCE

La più venduta

**3 VOLUMI,
UN'UNICA DIMENSIONE**


17, 22 e 28 litri, questi i volumi disponibili per la gamma A. Tre diverse capacità per permettere all'utente di scegliere la macchina più adatta alle proprie necessità.

Le dimensioni esterne, identiche per le tre macchine, consentono una semplice installazione. Cinque i vassoi per i modelli 17 e 22 litri, sei, invece, per la versione 28 litri.



DISPLAY LCD

Con pulsantiera, è dotato di icone grafiche chiare e intuitive. Il lavoro dell'operatore diventa semplice ed immediato grazie alla disponibilità di tutti i dati visualizzati a display. Facile da installare, una semplice procedura guidata aiuta la prima configurazione.

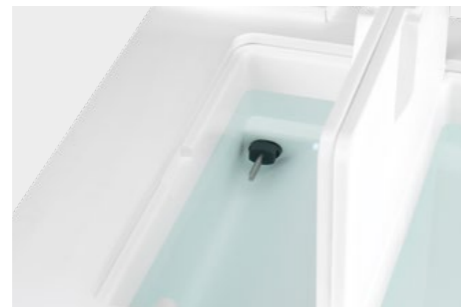

Gestione dell'acqua.

Gli sportelli posti sulla parte superiore dell'autoclave permettono di accedere ai serbatoi per il caricamento di acqua demineralizzata e per la loro pulizia. Il sensore presente all'interno del serbatoio, verifica la qualità dell'acqua e assicura il corretto funzionamento della macchina nel tempo.



Assistenza tecnica da remoto con Easy Check.

Tutte le autoclavi della gamma A sono dotate di WiFi integrato e porta Ethernet. Collegate ad internet, attivando il servizio Easy Check, possono ricevere assistenza da remoto. Si riducono drasticamente i tempi d'intervento permettendo al tecnico di mantenere le macchine costantemente in efficienza.



Software di tracciabilità.

MyTrace, è il software di tracciabilità disponibile per A. Utilizzando questo programma è possibile associare il set di strumenti sterilizzati al paziente tramite codice a barre. Insostituibile mezzo per completare il processo di sterilizzazione ed assicurare tutela legale all'odontoiatra.



USB.

I report cicli sono salvati automaticamente all'interno della memoria dell'autoclave e successivamente possono essere scaricati attraverso la porta USB posta sul frontale. I file, in formato PDF, potranno essere visualizzati su qualsiasi dispositivo.



Stampante.

A completamento della gamma A, è disponibile come accessorio opzionale una stampante esterna in grado di fornire report o etichette con codice a barre.