

Dati tecnici	A-17 PLUS	A-22 PLUS	A-28 PLUS
Tensione di alimentazione		220/240V 50Hz 220/230V 60Hz	
Potenza nominale		2300 W	
Dimensioni esterne LxAxP		480 x 500 x 600 mm	
Dimensioni camera DxP	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Peso totale	51 kg	52 kg	53 kg
Capacità serbatoio		4,5 litri	
Autonomia (con acqua al livello max)	da 7 a 11 cicli	da 6 a 10 cicli	da 5 a 9 cicli

CICLO	Tipo ciclo	Tempo di Sterilizzazione (min.)	Tempi ciclo compresi di tempo di sterilizzazione, al netto del tempo d'asciugatura (min.)			
			A-17 PLUS	A-22 PLUS	A-28 PLUS	Asciugatura*
134 °C UNIVERSALE	B	4	29	31	39	13-17
121 °C UNIVERSALE	B	20	45	48	52	13-17
134 °C VELOCE	S	4	20	23	26	1
134 °C SOLIDI IMBUSTATI	S	4	20	24	28	13-17
134 °C PRIONE	B	18	43	45	53	13-17
xxx °C CUSTOM	S	Ciclo personalizzabile dall'utente con temperature 134 °C / 121 °C, tempi di processo a partire da 4' (134 °C) o 20' (121 °C) e asciugatura impostabile				
VACUUM TEST		TEST	18	18	19	
HELIX/B&D TEST		TEST	20	24	28	
VACUUM + HELIX/B&D TEST (eseguiti in sequenza)		TEST	42	46	51	

* L'asciugatura varia in base al modello e al volume della macchina
 Nota: i tempi non considerano il tempo di preriscaldamento max (10min).
 Nota: i tempi possono variare in base al carico e all'alimentazione elettrica.
 Nota: i tempi dei modelli a 120V possono subire incrementi no ad un max. del 20%



Making Your Life Better.

BU Medical Equipment

Sede legale ed amministrativa Headquarters

Cefla s.c.
 Via Selice Provinciale, 23/a
 40026 Imola - Bo (Italy)
 tel. +39 0542 653111
 fax +39 0542 653344

Stabilimento Plant

Via Bicocca, 14/c
 40026 Imola - Bo (Italy)
 tel. +39 0542 653441
 fax +39 0542 653601



SOLIDA INNOVAZIONE

AUTOCLAVI ANTHOS A PLUS

A-17 PLUS
 A-22 PLUS
 A-28 PLUS

A PLUS.

re new



ENJOY THE DIFFERENCE

Acqua di rete, non necessita d'altro

**FILTRAZIONE INTEGRATA
CON MACCHINA
STAND-ALONE**

Come funziona

A differenza delle autoclavi tradizionali, A Plus non necessita di collegamento idrico esterno per il trattamento di acqua di rete. Grazie al filtro di demineralizzazione alloggiato nel serbatoio principale, l'utente può riempire quest'ultimo con semplice acqua del rubinetto. Ciò permette una elevata razionalizzazione degli spazi, lo snellimento dei processi ed un sensibile risparmio. Il sistema di filtraggio di A Plus garantisce una semplicità operativa senza precedenti.

Efficienza e risparmio

Mai prima d'ora una sterilizzatrice ha avuto performance così elevate e costi d'utilizzo talmente bassi. Lasciando al filtro di A Plus il compito di demineralizzare l'acqua, l'utilizzatore non dovrà approvvigionarsi di acqua demineralizzata; sarà sufficiente riempire il serbatoio della macchina con acqua del rubinetto. Lo stoccaggio delle taniche, il deterioramento della componentistica interna delle macchine causato dalla scarsa qualità dell'acqua, saranno da oggi solo un ricordo.



DISPLAY LCD.

A Plus è la sterilizzatrice intelligente, strumento di lavoro indispensabile, che garantisce prestazioni eccellenti anche grazie al display LCD touch a colori, con interfaccia utente semplice ed intuitiva. Ogni controllo è rappresentato da icone che rendono immediata la lettura dello stato della macchina.




Di.V.A.

Digital Virtual Assistant, questo acronimo di Di.V.A. Il primo sistema di controllo e tracciabilità dei dispositivi di sterilizzazione su Cloud. I dati, una volta salvati, saranno a disposizione degli operatori accedendo alla pagina web dedicata.



Assistenza tecnica da remoto con Easy Check.

Tutte le autoclavi della gamma A Plus sono dotate di WiFi integrato e porta Ethernet. Collegate ad internet, attivando il servizio Easy Check, possono ricevere assistenza da remoto. Si riducono drasticamente i tempi d'intervento permettendo al tecnico di mantenere le macchine costantemente in efficienza.

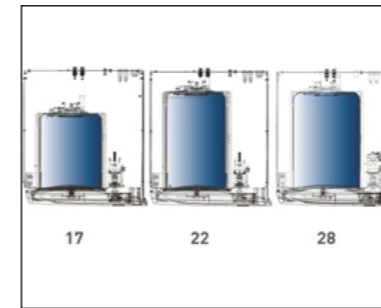

3 volumi, un'unica dimensione.

17, 22 e 28 litri, questi i volumi disponibili per la gamma A Plus. Tre diverse capacità per permettere all'utente di scegliere la macchina più adatta alle proprie necessità. Le dimensioni esterne, identiche per le tre macchine, consentono una semplice installazione. Cinque i vassoi per i modelli 17 e 22 litri, sei, invece, per la versione 28 litri.



Software di tracciabilità.

MyTrace, è il software di tracciabilità disponibile per A Plus. Utilizzando questo programma è possibile associare il set di strumenti sterilizzati al paziente tramite codice a barre. Insostituibile mezzo per completare il processo di sterilizzazione ed assicurare tutela legale all'odontoiatra.



Stampante.

A completamento della gamma A Plus, è disponibile come accessorio opzionale una stampante esterna in grado di fornire report o etichette con codice a barre.